

SPRIEVODNÉ TLAČIVO
pre overenie pohlavia - EMU

Došlo dňa :

Prevzal :

Majiteľ..... Adresa..... PSČ.....
IČO..... IČ DPH..... DIČ..... Tel..... email.....

Por.č.vz	ČÍSLO DNA TESTU*	MENO/OZNAČENIE ZVIERAŤA	ROK NARODENIA	TYP VZORKY (KRV/PERIE)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

* vyplňa laboratórium

Vzorka odobratá dňa Vzorka odoslaná dňa.....

.....
čitateľné meno a podpis osoby zodpovednej za odber vzoriek

.....
čitateľné meno a podpis osoby zodpovednej za správnosť údajov

UPOZORNENIE: Sprievodné tlačivo nahrádza záväznú objednávku! Bez čitateľného a úplného vyplnenia tohoto tlačiva nie je možné vzorky otestovať a budú zničené bez náhrady! Laboratórium genetiky nezodpovedá za odber vzoriek a správnosť údajov uvedených v sprievodnom tlačive. Pokyny pre odber vzoriek sú na druhej strane.

Pokyny pre odber vzoriek

1. Za identifikáciu zvierat'a a za správnosť odberu vzorky zodpovedá osoba, ktorá odber vykonala a podpísala tlačivo.
2. Skúmavky na odber krvi zasiela laboratórium na požiadanie (telefonické alebo písomné).
3. Krv je potrebné **odobrať sterilnou ihlou a ihneď premiešať** s antikoagulačným roztokom (nie heparín), aby sa zabránilo jej zrazeniu. Skúmavku je potrebné označiť menom zvierat'a.
4. V prípade odberu peria je potrebné **vytrhnúť** perie s **brkami** (aspoň 20 ks) a vložiť ho do samostatnej, menom zvierat'a označenej obálky. Perie nesmie byť odstrihnuté ani vypadnuté! Pri odbere peria nie je potrebná prítomnosť veterinárneho lekára. Pri súčasnom odbere peria od viacerých zvierat je potrebné zabrániť ich vzájomnej kontaminácii.
5. Laboratórium genetiky nezodpovedá za kvalitu zaslanej vzorky. V prípade zaslania nesprávne odobratej vzorky, z ktorej nie je možné vyizolovať dostatočné množstvo DNA, alebo zaslania kontaminovanej vzorky, ktorej DNA profil vykazuje aj prítomnosť biologického materiálu z iného zvierat'a, laboratórium zašle výzvu na opakovaný odber. Obe vzorky budú spoplatnené v plnej výške podľa platného cenníka.
6. **Sprievodné tlačivo** vyplňte čitateľne paličkovým písmom. Tlačivo s neúplnými alebo nečitateľnými údajmi nebude prevzaté do evidencie a vzorky nebudú zanalyzované. Za správnosť a úplnosť údajov zodpovedá osoba, ktorá vyplnila údaje a podpísala tlačivo.
7. Po prijatí vzoriek laboratórium vystaví zálohovú faktúru. Po zaplatení zálohovej faktúry a ukončení testov laboratórium odpošle výsledky spolu s už uhradenou faktúrou.